

Nome Técnico: Implantes Dentários (Osseointegrável)

Nome Comercial: Implante Dentário

DESCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Os Implantes Dentários Systhex são usinados em titânio, material biocompatível e osseointegrável.

Apresentam superfície porosa.

Para fixação protética, apresentam a opção de hexágono interno, hexágono externo e cone morse em diferentes modelos e tamanhos (vide tabela abaixo)

Os implantes dentários e os parafusos de cobertura são fornecidos estéreis para uso único. Eles são vendidos juntos ou isoladamente.

São acondicionados em embalagens que oferecem tripla proteção.

Embalagem Primária: O implante e o parafuso de cobertura são inseridos em um tubo com tampa, material: PS cristal.

Embalagem Secundária: São colocados em um blister, materiais: APET virgem, o qual será selado com papel grau cirúrgico. Embalagem Terciária: Cartucho.

Tabela 01: Modelos

Código	Descrição
817.812	Implante Classic-CISW 5.0 x 7.0mm c/ tapa
817.813	Implante Classic-CI SW 5.0 x 8.5mm c/ tapa
817.814	Implante Classic-CI SW 5.0 x 10 mm c/ tapa
817.815	Implante Classic-CISW 5.0 x 11.5mm c/ tapa
817.816	Implante Classic-CI SW 5.0 x 13 mm c/ tapa
817.817	Implante Classic-CI SW 5.0 x 15 mm c/ tapa
818.500	Implante Classic-INCR TS 3.75 x 8.5mm c/ tapa
818.501	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x 10mm c/tapa
8.119.007	Implante Estetic-CI 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.119.001	Implante Estetic-CI 4.0 x 8.5mm s/ tapa
8.119.002	Implante Estetic-CI 4.0 x 10 mm s/ tapa
8.119.003	Implante Estetic-CI 4.0 x 11.5mm s/ tapa
8.119.004	Implante Estetic-CI 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.119.005	Implante Estetic-CI 4.0 x 15 mm s/ tapa
8.119.006	Implante Estetic-CI 5.0 x 8.5mm s/tapa
8.119.008	Implante Estetic-CI 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.118.708	Implante Classic-in CR 3.75x 10 mm s/ tapa
8.118.709	Implante Classic-in CR 3.75 x 11.5mm s/ tapa
8.118.710	Implante Classic-in CR 3.75 x 13 mm s/ tapa
8.118.711	Implante Classic-in CR 3.75 x 15 mm s/ tapa
8.118.712	Implante Classic-in CR 4.0 x 7 mm s/ tapa
8.118.713	Implante Classic-in CR 4.0 x 8.5mm s/ tapa
8.118.714	Implante Classic-in CR 4.0 x 10 mm s/ tapa
8.118.715	Implante Classic-in CR 4.0 x 11.5mm s/ tapa
8.118.716	Implante Classic-in CR 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.118.717	Implante Classic-in CR 4.0 x 15 mm s/ tapa
8.118.718	Implante Classic-in CR 5.0 x 7 mm s/ tapa
8.118.719	Implante Classic-in CR 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.118.720	Implante Classic-in CR 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.118.721	Implante Classic-in CR 5.0 x 11.5mm s/ tapa

8.118.722	Implante Classic-in CR 5.0 x 13 mm s/ tapa
8.118.723	Implante Classic-in CR 5.0 x 15 mm s/ tapa
818.502	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x 11.5mm c/ tapa
8.117.604	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 15 mm s/ tapa
8.117.605	Implante Classic-CI TSSW 4.0 x 8.5mm s/ tapa
8.117.606	Implante Classic-CI TS SW 4.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.607	Implante Classic-CI TS SW 4.0 x 11.5mm s/ tapa
8.117.608	Implante Classic-CI TS SW 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.117.609	Implante Classic-CI TS SW 4.0 x15mm s/ tapa
8.117.610	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.117.611	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.612	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.117.613	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x13mm s/ tapa
8.117.614	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.117.701	Implante Classic Curto 4.0 x 5.0mm s/ tapa
8.117.702	Implante Classic Curto 4.0 x 6.0 mm s/ tapa
8.117.703	Implante Classic Curto 5.0 x 5.0mm s/ tapa
8.117.704	Implante Classic Curto 5.0 x 6.0mm s/ tapa
8.117.800	Implante Classic-CI SW 3.75 x 7.0 mm s/ tapa
8.117.801	Implante Classic-CI SW 3.75 x 8.5mm s/ tapa
8.117.802	Implante Classic-CI SW 3.75 x 10 mm s/ tapa
8.117.803	Implante Classic-CI SW 3.75x 11.5mm s/ tapa
8.117.804	Implante Classic-CI SW 3.75 x 13 mm s/ tapa
8.117.805	Implante Classic-CI SW 3.75 x 15 mm s/ tapa
8.117.806	Implante Classic-CI SW 4.0 x 7.0mm s/ tapa
8.117.807	Implante Classic-CI SW 4.0 x 8.5 mm s/ tapa
8.117.808	Implante Classic-CI SW 4.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.809	Implante Classic-CI SW 4.0 x 11.5mm s/ tapa
8.117.810	Implante Classic-CI SW 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.117.811	Implante Classic-CI SW 4.0 x 15 mm s/ tapa
8.117.812	Implante Classic-CI SW 5.0 x 7.0mm s/ tapa
8.117.813	Implante Classic-CI SW 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.117.814	Implante Classic-CI SW 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.815	Implante Classic-CI SW 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.117.816	Implante Classic-CI SW 5.0 x 13 mm s/ tapa
8.117.817	Implante Classic-CI SW 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.118.500	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x 8.5mm s/ tapa
8.118.501	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x10mm s/ tapa
8.118.502	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x 11.5mm s/ tapa
8.118.503	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x 13mm s/ tapa
8.118.504	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x 15mm s/ tapa
8.118.505	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x8.5mm s/ tapa
8.118.506	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x 10mm s/ tapa
8.118.507	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x 11.5mm s/ tapa
8.118.508	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x 13mm s/ tapa
8.118.509	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x15mm s/ tapa

8.118.510	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.118.705	Implante Classic-in CR 3.5 x15mm s/ tapa
8.118.511	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x 10mm s/ tapa
8.118.512	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.118.513	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x13mm s/ tapa
8.118.514	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x 15mm s/ tapa
8.118.701	Implante Classic-in CR 3.5 x 8.5mm s/ tapa
8.118.702	Implante Classic-in CR 3.5 x10mm s/ tapa
8.118.703	Implante Classic-in CR 3.5 x 11.5mm s/ tapa
8.118.704	Implante Classic-in CR 3.5 x 13 mm s/ tapa
8.118.706	Implante Classic-in CR 3.75 x 7 mm s/ tapa
8.118.707	Implante Classic-in CR 3.75 x 8.5mm s/ tapa
817.611	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 10 mm c/ tapa
8.119.009	Implante Estetic-CI 5.0 x 13 mm s/ tapa
8.117.015	Implante Classic-CI 4.5 x 10 mm s/ tapa
8.117.016	Implante Classic-CI 4.5 x 11.5mm s/ tapa
8.117.017	Implante Classic-CI 4.5 x 13 mm s/ tapa
8.117.018	Implante Classic-CI 4.5 x 15 mm s/ tapa
8.117.019	Implante Classic-CI 5.0 x 7mm s/ tapa
8.117.020	Implante Classic-CI 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.117.021	Implante Classic-CI 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.022	Implante Classic-CI 5.0 x 11.5 mm s/ tapa
8.117.023	Implante Classic-CI 5.0 x 13 mm s/ tapa
8.117.024	Implante Classic-CI 5.0 x 15 mm s/ tapa
	Implante Proto 4.0: 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Unik 3.75: 8.5 / 10 / 11.5 /13 / 15
	Implante Unik 4.0: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Unik 5.0: 8.5 / 10 / 11.5 /13 / 15
	Implante Classic-in CR 4.0: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Cone Morse 3.5: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Estetic in 5.0: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
821.934	Implante Attract TS 3.75x 15mm c/ tapa
8.117.013	Implante Classic-CI 4.5 x 7 mm s/ tapa
8.117.014	Implante Classic-CI 4.5 x 8.5mm s/tapa
8.117.201	Implante Classic Tradicional 3.5 x 8.5 mm s/tapa
8.117.202	Implante Classic Tradicional 3.5 x 10 mm s/tapa
8.117.203	Implante Classic Tradicional 3.5 x 11.5mm s/tapa
8.117.204	Implante Classic Tradicional 3.5 x 13 mm s/tapa
8.117.205	Implante Classic Tradicional 3.5 x 15 mm s/tapa
8.117.295	Implante Classic Tradicional 3.75 x 7.0mm s/tapa
8.117.296	Implante Classic Tradicional 3.75 x 8.5mm s/tapa
8.117.297	Implante Classic Tradicional 3.75 x 10 mm s/tapa
8.117.298	Implante Classic Tradicional 3.75 x 11.5mm s/ tapa
8.117.299	Implante Classic Tradicional 3.75 x 13 mm s/ tapa
8.117.300	Implante Classic Tradicional 3.75 x 15 mm s/ tapa
8.117.301	Implante Classic Tradicional 4.0 x 7.0mm s/ tapa

8.117.302	Implante Classic Tradicional 4.0 x 8.5mm s/ tapa
8.117.303	Implante Classic Tradicional 4.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.304	Implante Classic Tradicional 4.0 x 11.5mm s/ tapa
8.117.305	Implante Classic Tradicional 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.117.306	Implante Classic Tradicional 4.0 x15mm s/ tapa
8.117.307	Implante Classic Tradicional 5.0 x 7.0mm s/ tapa
8.117.308	Implante Classic Tradicional 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.117.309	Implante Classic Tradicional 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.310	Implante Classic Tradicional 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.117.311	Implante Classic Tradicional 5.0 x 13 mm s/ tapa
8.117.312	Implante Classic Tradicional 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.117.500	Implante Classic-CI TS 3.75 x 8.5mm s/ tapa
8.117.501	Implante Classic-CI TS 3.75 x 10 mm s/ tapa
8.117.502	Implante Classic-CI TS 3.75 x 11.5mm s/ tapa
8.117.503	Implante Classic-CI TS 3.75 x 13 mm s/ tapa
8.117.504	Implante Classic-CI TS 3.75x 15 mm s/ tapa
8.117.505	Implante Classic-CI TS 4.0 x 8.5mm s/ tapa
8.117.506	Implante Classic-CI TS 4.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.507	Implante Classic-CI TS 4.0 x 11.5mm s/ tapa
8.117.508	Implante Classic-CI TS 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.117.509	Implante Classic-CI TS 4.0 x 15 mm s/ tapa
8.117.510	Implante Classic-CI TS 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.117.511	Implante Classic-CI TS 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.117.512	Implante Classic-CI TS 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.117.513	Implante Classic-CI TS 5.0 x13mm s/ tapa
8.117.514	Implante Classic-CI TS 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.117.600	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 8.5mm s/ tapa
8.117.601	Implante Classic-CI TSSW 3.75 x 10 mm s/ tapa
8.117.602	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 11.5mm s/tapa
8.117.603	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 13 mm s/ tapa
818.755	Implante IN MS 3.75 x 18 mm c/ tapa
818.756	Implante IN MS 3.75 x 20 mm c/ tapa
818.757	Implante IN MS 3.75 x22mm c/ tapa
818.758	Implante IN MS 3.75 x 25 mm c/ tapa
818.759	Implante IN MS 4.0 x 18 mm c/ tapa
818.760	Implante IN MS 4.0 x 20 mm c/ tapa
818.761	Implante IN MS 4.0 x 22 mm c/ tapa
818.762	Implante IN MS 4.0 x 25 mm c/ tapa
818.763	Implante IN MS 4.5 x 18 mm c/ tapa
818764	Implante IN MS 4.5 x 20 mm c/ tapa
818.765	Implante IN MS 4.5 x 22 mm c/ tapa
818.766	Implante IN MS 4.5x 25 mm c/ tapa
8.188.776	Implante Cone Fix 2.8 x 9 mm s/ tapa
8.188.777	Implante Cone Fix 2.8 x 11 mm s/ tapa
8.188.778	Implante Cone Fix 2.8 x 13 mm s/ tapa
8.188.779	Implante Cone Fix 2.8x 15 mm s/ tapa

819.012	Implante Estetic-CI 3.5 x 10 mm c/ tapa
819.013	Implante Estetic-CI 3.5 x 11.5mm c/ tapa
819.014	Implante Estetic-CI 3.5 x 13 mm c/ tapa
819.015	Implante Estetic-CI 3.5 x15mm c/ tapa
820.095	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 8.5mm c/ tapa
820.096	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 10 mm c/ tapa
820.097	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 11.5mm c/ tapa
820.098	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 13 mm c/ tapa
820.099	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 15 mm c/ tapa
820.101	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 8.5mm c/ tapa
820.102	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 10 mm c/ tapa
820.103	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 11.5mm c/ tapa
820.104	Implante Estetic-IN CR 4.0 x13mm c/ tapa
820.105	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 15 mm c/ tapa
821.010	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 8.5mm c/ tapa
821.011	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 10 mm c/tapa
821.012	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 11.5mm c/ tapa
821.013	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 13 mm c/ tapa
821.014	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 15 mm c/ tapa
821.020	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x 8.5mm c/ tapa
821.021	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x10mm c/ tapa
821.022	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x 11.5mm c/ tapa
821.023	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x 13 mm c/ tapa
821.024	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x15mm c/ tapa
821.930	Implante Attract TS 3.75 x 8.5mm c/ tapa
821.931	Implante Attract TS 3.75 x 10mm c/ tapa
821.932	Implante Attract TS 3.75 x 11.5mm c/ tapa
821.933	Implante Attract TS 3.75 x 13mm c/
821.935	Implante Attract TS 4.3 x 8.5mm c/ tapa
821.936	Implante Attract TS 4.3 x 10mm c/ tapa
870.000	Implante Zigomático 4.4 x 30 mm c/ tapa
870.001	Implante Zigomático 4.4 x 35 mm c/ tapa
870.002	Implante Zigomático 4.4x 40 mm c/ tapa
870.003	Implante Zigomático 4.4 x 45 mm c/ tapa
870.004	Implante Zigomático 4.4 x 47.5mm c/ tapa
870.005	Implante Zigomático 4.4 x 50mm/ tapa
870.006	Implante Zigomático 4.4 x 52.5mm c/ tapa
870.010	Implante Zigoma Allure 4.4 x 30 mm c/ tapa
870.011	Implante Zigoma Allure 4.4 x 35 mm c/tapa
870.012	Implante Zigoma Allure 4.4 x 40 mm c/ tapa
870.013	Implante Zigoma Allure 4.4 x 45 mm c/ tapa
870.014	Implante Zigoma Allure 4.4 x 47.5mm c/tapa
870.015	Implante Zigoma Allure 4.4 x 50 mm c/ tapa
870.016	Implante Zigoma Allure 4.4 x 52.5mm c/ tapa
870.029	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 25 mm c/ tapa
870.030	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 30 mm c/ tapa

870.031	Implante Zigoma IN MS 3.8x 32.5mm c/ tapa
870.032	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 35 mm c/ tapa
870.033	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 37.5mm c/ tapa
870.034	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 40 mm c/ tapa
870.035	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 42.5mm c/ tapa
870.036	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 45 mm c/ tapa
870.037	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 47.5mm c/ tapa
870.038	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 50 mm c/ tapa
870.039	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 52.5 mm c/ tapa
870.040	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 55 mm c/ tapa
870.041	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 57.5mm c/ tapa
870.042	Implante Zigoma IN MS 3.8 x 60 mm c/ tapa
877.070	Implante Avantt 3.5 x 8.5mm c/ tapa
877.071	Implante Avantt 3.5 x 10 mm c/ tapa
877.072	Implante Avantt 3.5 x 11.5mm c/ tapa
877.073	Implante Avantt 3.5 x 13 mm c/ tapa
877.074	Implante Avantt 3.5 x 15 mm c/ tapa
877.075	Implante Avantt 4.3 x 8.5mm c/ tapa
877.076	Implante Avantt 4.3 x 10 mm c/ tapa
877.077	Implante Avantt 4.3 x 11.5mm c/ tapa
877.078	Implante Avantt 4.3 x 13 mm c/ tapa
877.079	Implante Avantt 4.3 x 15mmc/ tapa
877.080	Implante Avantt 5.0 x 8.5mm c/ tapa
877.081	Implante Avantt 5.0 x10mm c/ tapa
877.082	Implante Avantt 5.0 x 11.5mm c/ tapa
877.083	Implante Avantt 5.0 x 13 mm c/ tapa
877.084	Implante Avantt 5.0 x 15 mm c/ tapa
877.700	Implante Azzo 3.5x 8.5mm c/ tapa
877.701	Implante Azzo 3.5 x 10 mm c/ tapa
877.702	Implante Azzo 3.5 x 11.5mm c/ tapa
877.703	Implante Azzo 3.5 x 13 mm c/ tapa
877.704	Implante Azzo 3.5 x 15 mm c/ tapa
877.705	Implante Azzo 4.3 x 8.5mm c/ tapa
877.706	Implante Azzo 4.3 x 10 mm c/ tapa
877.707	Implante Azzo 4.3 x 11.5 mm c/ tapa
877.708	Implante Azzo 4.3 x 13 mm c/ tapa
877.709	Implante Azzo 4.3 x 15 mm c/ tapa
877.710	Implante Azzo 5.0 x 8.5mm c/ tapa
877.711	Implante Azzo 5.0 x 10 mm c/ tapa
877.712	Implante Azzo 5.0 x 11.5mm c/ tapa
877.713	Implante Azzo 5.0 x 13 mm c/ tapa
877.714	Implante Azzo 5.0 x 15mmc/ tapa
877.720	Implante Clássico CM 3.5 x 7 mm c/ tapa
877.721	Implante Clássico CM 3.5 x 8.5mm c/ tapa
877.722	Implante Clássico CM 3.5 x 10 mm c/tapa
877.723	Implante Clássico CM 3.5 x 11.5mm c/ tapa

877.724	Implante Clássico CM 3.5 x 13 mm c/ tapa
877.725	Implante Clássico CM 3.5 x 15 mm c/tapa
877.726	Implante Clássico CM 3.5 x 7 mm c/ tapa
877.727	Implante Clássico CM 3.8 x 8.5mm c/ tapa
877.728	Implante Clássico CM 3.8 x 10 mm c/tapa
877.729	Implante Clássico CM 3.8 x 11.5mm c/ tapa
877.730	Implante Clássico CM 3.8 x 13 mm c/ tapa
877.731	Implante Clássico CM 3.8 x 15 mm c/tapa
877.732	Implante Clássico CM 4.3 x 7 mm c/ tapa
877.733	Implante Clássico CM 4.3 x 8.5mm c/ tapa
877.734	Implante Clássico CM 4.3 x 10 mm c/tapa
877.735	Implante Clássico CM 4.3 x 11.5mm c/ tapa
877.736	Implante Clássico CM 4.3 x 13 mm c/ tapa
877.737	Implante Clássico CM 4.3 x 15 mm c/tapa
8.818.740	Implante IN MS 3.75 x 8.5mm s/ tapa
8.818.741	Implante IN MS 3.75 x 10 mm s/ tapa
8.818.742	Implante IN MS 3.75 x 11.5mm s/ tapa
8.818.743	Implante IN MS 3.75 x 13 mm s/ tapa
8.818.744	Implante IN MS 3.75 x 15mm s/ tapa
8.818.745	Implante IN MS 4.0 x 8.5mm s/ tapa
8.818.746	Implante IN MS 4.0 x 10 mm s/ tapa
8.818.747	Implante IN MS 4.0 x 11.5mm s/tapa
8.818.748	Implante IN MS 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.818.749	Implante IN MS 4.0 x 15 mm s/ tapa
8.818.750	Implante IN MS 4.5 x 8.5mm s/ tapa
8.818.751	Implante IN MS 4.5 x 10 mm s/ tapa
8.818.760	Implante IN MS 4.0 x 20 mm s/ tapa
8.818.761	Implante IN MS 4.0 x 22 mm s/ tapa
8.818.762	Implante IN MS 4.0 x 25 mm s/tapa
8.818.763	Implante IN MS 4.5 x 18 mm s/ tapa
8.818.764	Implante IN MS 4.5 x 20 mm s/ tapa
8.818.765	Implante IN MS 4.5 x 22 mm s/ tapa
8.818.766	Implante IN MS 4.5 x 25 mm s/ tapa
8.877.700	Implante Azzo 3.5 x 8.5 mm s/ tapa
8.877.701	Implante Azzo 3.5 x 10 mm s/ tapa
8.877.702	Implante Azzo 3.5 x 11.5mm s/ tapa
8.877.703	Implante Azzo 3.5 x 13 mm s/ tapa
8.877.704	Implante Azzo 3.5 x 15 mm s/ tapa
8.877.705	Implante Azzo 4.3 x 8.5mm s/ tapa
8.877.706	Implante Azzo 4.3 x 10 mm s/ tapa
8.877.707	Implante Azzo 4.3 x 11.5mm s/ tapa
8.877.708	Implante Azzo 4.3 x 13 mm s/ tapa
8.877.709	Implante Azzo 4.3 x 15 mm s/ tapa
8.877.710	Implante Azzo 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.877.711	Implante Azzo 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.877.712	Implante Azzo 5.0 x 11.5mm s/ tapa

8.877.713	Implante Azzo 5.0 x 13 mm s/ tapa
8.877.714	Implante Azzo 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.877.720	Implante Clássico CM 3.5 x 7 mm s/tapa
8.877.721	Implante Clássico CM 3.5 x 8.5mm s/ tapa
8.877.722	Implante Clássico CM 3.5 x 10 mm s/ tapa
8.877.723	Implante Clássico CM 3.5 x 11.5mm s/ tapa
8.877.724	Implante Clássico CM 3.5 x 13 mm s/ tapa
8.877.725	Implante Clássico CM 3.5 x 15 mm s/ tapa
8.877.726	Implante Clássico CM 3.8 x 7 mm s/tapa
8.877.727	Implante Clássico CM 3.8 x 8.5mm s/ tapa
8.877.728	Implante Clássico CM 3.8 x 10m m s/ tapa
8.877.729	Implante Clássico CM 3.8 x 11.5mm s/ tapa
8.877.730	Implante Clássico CM 3.8 x 13 mm s/ tapa
8.877.731	Implante Clássico CM 3.8 x 15 mm s/ tapa
8.877.732	Implante Clássico CM 4.3 x 7 mm s/tapa
8.877.733	Implante Clássico CM 4.3 x 8.5mm s/ tapa
8.877.734	Implante Clássico CM 4.3 x 10 mm s/ tapa
8.877.735	Implante Clássico CM 4.3 x 11.5 mm s/ tapa
8.877.736	Implante Clássico CM 4.3 x 13 mm s/ tapa
8.877.737	Implante Clássico CM 4.3 x 15 mm s/ tapa
8.818.752	Implante IN MS 4.5 x 11.5mm s/tapa
8.818.753	Implante IN MS 4.5 x 13 mm s/ tapa
8.818.754	Implante IN MS 4.5 x 15 mm s/ tapa
8.818.755	Implante IN MS 3.75 x 18 mm s/ tapa
8.818.756	Implante IN MS 3.75 x 20 mm s/ tapa
8.818.757	Implante IN MS 3.75 x 22 mm s/tapa
8.818.758	Implante IN MS 3.75 x 25 mm s/ tapa
8.818.759	Implante IN MS 4.0 x 18 mm s/ tapa
818.503	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x 13mm c/ tapa
818.504	Implante Classic-IN CR TS 3.75 x15mm c/ tapa
818.505	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x 8.5mm c/ tapa
818.506	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x 10mm c/ tapa
818.507	Implante Classic-IN CR TS4.0 x 11.5mm c/ tapa
818.508	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x 13mm c/ tapa
818.509	Implante Classic-IN CR TS 4.0 x 15mm c/ tapa
818.510	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x 8.5mm c/ tapa
818.511	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x 10mm c/tapa
818.512	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x 11.5mm c/ tapa
818.513	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x 13mm c/ tapa
818.514	Implante Classic-IN CR TS 5.0 x15mm c/ tapa
819.011	Implante Estetic-CI 3.5 x 8.5mm c/ tapa
818.740	Implante IN MS 3.75 x 8.5mm c/ tapa
818.741	Implante IN MS 3.75 x 10 mm c/ tapa
818.742	Implante IN MS 3.75 x 11.5mm c/ tapa
818.743	Implante IN MS 3.75 x 13 mm c/ tapa
818.744	Implante IN MS 3.75 x 15 mm c/ tapa

818.745	Implante IN MS 4.0 x 8.5 mm c/ tapa
818.746	Implante IN MS 4.0 x 10 mm c/ tapa
818.747	Implante INMS 4.0 x 11.5mm c/ tapa
818.748	Implante IN MS 4.0 x 13 mm c/ tapa
818.749	Implante IN MS 4.0 x 15 mm c/ tapa
818.750	Implante IN MS 4.5 x 8.5mm c/ tapa
818.751	Implante IN MS 4.5 x 10 mm c/ tapa
818.752	Implante IN MS 4.5 x 11.5 mm c/ tapa
818.753	Implante IN MS 4.5 x 13 mm c/ tapa
818.754	Implante IN MS 4.5 x 15 mm c/ tapa
821.938	Implante Attract TS 4.3 x 13 mm c/ tapa
821.939	Implante Attract TS 4.3 x 15 mm c/ tapa
821.940	Implante Attract TS 5.0 x 8.5 mm c/ tapa
821.941	Implante Attract TS 5.0 x 10 mm c/ tapa
821.942	Implante Attract TS 5.0 x 11.5mm c/ tapa
821.943	Implante Attract TS 5.0 x 13 mm c/ tapa
821.944	Implante Attract TS 5.0 x15 mm c/ tapa
821.950	Implante Allure 3.75 x 5 mm c/ tapa
821.951	Implante Allure 3.75 x 6mm c/ tapa
821.937	Implante Attract TS 4.3 x 11.5mm c/ tapa
821.952	Implante Allure 3.75 x 7 mm c/ tapa
821.953	Implante Allure 4.5 x 5 mm c/ tapa
821.954	Implante Allure 4.5 x 6 mm c/ tapa
821.955	Implante Allure 4.5 x 7 mm c/ tapa
	Implante Attract 3.5: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Attract 4.3: 8.5 /10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Attract 5.0: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic Ci 3.75: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic Ci 4.0: 7 / 8.5 /10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic Ci 4.5: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic Curto 5.0: 5.0 / 6.0
	Implante Classic Tradicional 3.75: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 /15
	Implante Classic Tradicional 4.0: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic Tradicional 3.3: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic 3.3 x8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic 4.0: 5.0/ 6.0
	Implante Classic 5.0: 5.0/ 6.0
	Implante Classic Curto 4.0: 5.0 / 6.0
	Implante Classic-in CR 3.5: 8.5 /10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic-in CR 3.75: 7 /8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic-in CR 5.0: 7 / 8.5 / 10 /11.5 / 13 / 15
	Implante Classic-in 3.5: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 /15
	Implante Classic-in: 3.75: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic-in 5: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic-in: 4.0: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Classic Tradicional 5.0: 7 / 8.5 /10 / 11.5 / 13 / 15

	Implante Cone Fix 2.8 x 11 mm
	Implante Cone Fix 2.8 x 15 mm
	Implante Cone Fix 2.8 x 9 mm
	Implante Cone Fix 2.8x 13 mm
	Implante Cone Morse 4.3: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 /15
	Implante Cone Morse 5.0: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Estetic Ci 4.0: 8.5 / 10 /11.5 / 13 / 15
	Implante Estetic Ci 5.0: 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Estetic Ci 5.0: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Estetic in 4.0: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
	Implante Estetic-in CR 4.0: 8.5 / 10 / 11.5 / 13/15
	Implante Fit-Hex 3.3: 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15
8.121.934	Implante Attract TS 3.75 x 15 mm s/ tapa
8.121.935	Implante Attract TS 4.3 x 8.5mm s/ tapa
8.121.936	Implante Attract TS 4.3 x 10 mm s/ tapa
8.121.937	Implante Attract TS 4.3 x 11.5mms/ tapa
8.121.938	Implante Attract TS 4.3 x 13 mm s/ tapa
8.121.939	Implante Attract TS 4.3 x 15 mm s/ tapa
8.121.940	Implante Attract TS 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.121.941	Implante Attract TS 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.121.942	Implante Attract TS 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.121.943	Implante Attract TS 5.0 x 1 3mm s/ tapa
8.121.944	Implante Attract TS 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.121.950	Implante Allure 3.75 x 5 mm s/tapa
8.121.951	Implante Allure 3.75 x 6mm s/ tapa
8.121.952	Implante Allure 3.75x 7 mm s/ tapa
8.121.953	Implante Allure 4.5 x 5 mm s/ tapa
8.121.954	Implante Allure 4.5 x 6 mm s/ tapa
8.121.955	Implante Allure 4.5 x 7 mm s/ tapa
8.170.000	Implante Zigomático 4.4 x 30 mm s/ tapa
8.170.001	Implante Zigomático 4.4 x 35 mm s/ tapa
8.170.002	Implante Zigomático 4.4 x 40 mm s/ tapa
8.170.003	Implante Zigomático 4.4 x 45 mm s/ tapa
8.170.004	Implante Zigomático 4.4 x 47.5mm s/ tapa
8.170.005	Implante Zigomático 4.4 x 50 mm s/ tapa
8.170.006	Implante Zigomático 4.4 x 52.5mm s/ tapa
8.170.010	Implante Zigoma Allure 4.4 x 30 mm s/ tapa
8.170.011	Implante Zigoma Allure 4.4 x 35 mm s/ tapa
8.119.010	Implante Estetic-CI 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.119.011	Implante Estetic-CI 3.5 x 8.5mm s/ tapa
8.119.012	Implante Estetic-CI 3.5 x 10 mm s/ tapa
8.119.013	Implante Estetic-CI 3.5 x 11.5mm s/ tapa
8.119.014	Implante Estetic-CI 3.5 x 13 mm s/ tapa
8.119.015	Implante Estetic-CI 3.5 x 15 mm s/ tapa
8.120.095	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 8.5mm s/ tapa
8.120.096	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 10 mm s/tapa

8.120.097	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 11.5mm s/ tapa
8.120.098	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 13mm s/ tapa
8.120.099	Implante Estetic-IN CR 3.5 x 15 mm s/tapa
8.120.101	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 8.5mm s/ tapa
8.120.102	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 10mm s/ tapa
8.120.103	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 11.5mm s/tapa
8.120.104	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.120.105	Implante Estetic-IN CR 4.0 x 15mm s/ tapa
8.120.106	Implante Estetic-IN CR 5.0 x 8.5mm s/tapa
8.120.107	Implante Estetic-IN CR 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.120.108	Implante Estetic-IN CR 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.120.109	Implante Estetic-IN CR 5.0 x 13 mm s/tapa
8.120.110	Implante Estetic-IN CR 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.121.001	Implante Fit-Hex 3.3 x 8.5mm s/ tapa
8.121.002	Implante Fit-Hex 3.3 x 10 mm s/ tapa
8.121.003	Implante Fit-Hex 3.3 x 11.5mm s/ tapa
8.121.004	Implante Fit-Hex 3.3 x 13 mm s/tapa
8.121.005	Implante Fit-Hex 3.3 x 15 mm s/ tapa
8.121.010	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 8.5mm s/ tapa
8.121.011	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 10 mm s/ tapa
8.121.012	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 11.5mm s/ tapa
8.121.013	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 13 mm s/ tapa
8.121.014	Implante Fit-Hex CI 3.3 x 15 mm s/ tapa
8.121.020	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x 8.5mm s/ tapa
8.121.021	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x 10 mm s/tapa
8.121.022	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x 11.5mm s/ tapa
8.121.023	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x 13 mm s/ tapa
8.121.024	Implante Fit-Hex CI TS 3.3 x 15 mm s/tapa
8.121.901	Implante Attract 3.5 x 8.5mm s/ tapa
8.121.902	Implante Attract 3.5x 10 mm s/ tapa
8.121.903	Implante Attract 3.5 x 11.5mm s/ tapa
8.121.904	Implante Attract 3.5 x 13 mm s/ tapa
8.121.905	Implante Attract 3.5 x 15 mm s/ tapa
8.121.906	Implante Attract 4.3 x 8.5mm s/ tapa
8.121.907	Implante Attract 4.3 x10mm s/ tapa
8.121.908	Implante Attract 4.3 x 11.5mm s/ tapa
8.121.909	Implante Attract 4.3 x 13 mm s/ tapa
8.121.910	Implante Attract 4.3 x 15 mm s/ tapa
8.121.911	Implante Attract 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.121.912	Implante Attract 5.0 x10mm s/ tapa
8.121.913	Implante Attract 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.121.914	Implante Attract 5.0 x 13 mm s/ tapa
8.121.915	Implante Attract 5.0 x 15 mm s/ tapa
8.121.930	Implante Attract TS 3.75 x 8.5mm s/ tapa
8.121.931	Implante Attract TS 3.75 x 10 mm s/ tapa
8.121.932	Implante Attract TS 3.75 x 11.5mm s/ tapa

8.121.933	Implante Attract TS 3.75 x 13 mm s/ tapa
8.170.012	Implante Zigoma Allure 4.4 x 40 mm s/ tapa
8.170.013	Implante Zigoma Allure 4.4 x 45 mm s/ tapa
8.170.014	Implante Zigoma Allure 4.4 x 47.5 mm s/ tapa
8.170.015	Implante Zigoma Allure 4.4 x 50 mm s/ tapa
8.170.016	Implante Zigoma Allure 4.4 x 52.5mm s/tapa
8.170.018	Implante Classic-CI 3.75 x 7 mm s/ tapa
8.170.028	Implante Classic-CI 3.75 x 8.5mm s/ tapa
8.170.038	Implante Classic-CI 3.75 x 10 mm s/ tapa
8.170.048	Implante Classic-CI 3.75 x 11.5mm s/ tapa
8.170.058	Implante Classic-CI 3.75 x 13 mm s/ tapa
8.170.068	Implante Classic-CI 3.75 x 15 mm s/ tapa
8.170.078	Implante Classic-CI 4.0 x 7 mm s/ tapa
8.170.088	Implante Classic-CI 4.0x 8.5mm s/ tapa
8.170.098	Implante Classic-CI 4.0 x 10 mm s/ tapa
8.170.108	Implante Classic-CI 4.0 x 11.5 mm s/ tapa
8.170.118	Implante Classic-CI 4.0 x 13 mm s/ tapa
8.170.128	Implante Classic-CI 4.0 x 15 mm s/ tapa
817.500	Implante Classic-CI TS 3.75 x 8.5mm c/ tapa
817.501	Implante Classic-CI TS 3.75 x 10 mm c/ tapa
817.502	Implante Classic-CI TS 3.75 x 11.5mm c/ tapa
817.503	Implante Classic-CI TS 3.75 x 13 mm c/ tapa
817.504	Implante Classic-CI TS 3.75 x 15 mm c/ tapa
817.505	Implante Classic-CI TS 4.0 x 8.5mm c/ tapa
817.506	Implante Classic-CI TS 4.0 x 10 mm c/ tapa
817.507	Implante Classic-CI TS 4.0 x 11.5mm c/ tapa
817.508	Implante Classic-CI TS 4.0 x 13 mm c/ tapa
817.509	Implante Classic-CI TS 4.0 x 15 mm c/ tapa
817.510	Implante Classic-CI TS 5.0 x 8.5mm c/ tapa
817.511	Implante Classic-CI TS 5.0 x 10 mm c/ tapa
817.512	Implante Classic-CI TS 5.0 x 11.5mm c/ tapa
817.513	Implante Classic-CI TS 5.0 x 13 mm c/ tapa
817.514	Implante Classic-CI TS 5.0 x 15 mm c/ tapa
817.600	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 8.5mm c/ tapa
817.601	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 10 mm c/ tapa
817.602	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 11.5mm c/ tapa
817.603	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 13 mm c/ tapa
817.604	Implante Classic-CI TS SW 3.75 x 15 mm c/ tapa
817.605	Implante Classic-CI TSSW 4.0 x 8.5mm c/ tapa
817.606	Implante Classic-CI TS SW 4.0 x 10 mm c/ tapa
817.607	Implante Classic-CI TS SW 4.0 x 11.5mm c/ tapa
817.608	Implante Classic-CI TS SW 4.0 x 13 mm c/ tapa
817.609	Implante Classic-CI TS SW 4.0 x15mm c/ tapa
817.610	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 8.5mm c/ tapa
817.612	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 11.5mm c/ tapa
817.613	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 13 mm c/ tapa

817.614	Implante Classic-CI TS SW 5.0 x 15 mm c/ tapa
8.177.070	Implante Avantt 3.5 x 8.5mm s/ tapa
8.177.071	Implante Avantt 3.5 x 10 mm s/ tapa
8.177.072	Implante Avantt 3.5 x 11.5mm s/ tapa
8.177.073	Implante Avantt 3.5 x13mm s/ tapa
8.177.074	Implante Avantt 3.5 x 15 mm s/ tapa
8.177.075	Implante Avantt 4.3 x 8.5mm s/ tapa
8.177.076	Implante Avantt 4.3 x 10 mm s/ tapa
8.177.077	Implante Avantt 4.3 x 11.5mm s/ tapa
8.177.078	Implante Avantt 4.3 x13mm s/ tapa
8.177.079	Implante Avantt 4.3 x 15 mm s/ tapa
8.177.080	Implante Avantt 5.0 x 8.5mm s/ tapa
8.177.081	Implante Avantt 5.0 x 10 mm s/ tapa
8.177.082	Implante Avantt 5.0 x 11.5mm s/ tapa
8.177.083	Implante Avantt 5.0 x13mm s/ tapa
8.177.084	Implante Avantt 5.0 x 15 mm s/ tapa
817.800	Implante Classic-CI SW 3.75 x 7.0mm c/ tapa
817.801	Implante Classic-CI SW 3.75 x 8.5mm c/ tapa
817.802	Implante Classic-CI SW 3.75 x 10 mm c/ tapa
817.803	Implante Classic-CISW 3.75 x 11.5mm c/ tapa
817.804	Implante Classic-CI SW 3.75 x 13 mm c/ tapa
817.805	Implante Classic-CI SW 3.75 x 15 mm c/ tapa
817.806	Implante Classic-CISW 4.0 x 7.0mm c/ tapa
817.807	Implante Classic-CI SW 4.0 x 8.5mm c/ tapa
817.808	Implante Classic-CI SW 4.0 x 10 mm c/ tapa
817.809	Implante Classic-CISW 4.0 x 11.5mm c/ tapa
817.810	Implante Classic-CI SW 4.0 x 13 mm c/ tapa
817.811	Implante Classic-CI SW 4.0 x 15 mm c/ tapa

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

São indicados para reabilitação oral, funcional e estética, como estrutura na substituição de dentes por próteses.

Os Implantes Dentários Systhex podem ser usados na mandíbula ou na maxila. Para o sucesso da cirurgia deve-se fazer uma correta preparação do leito ósseo de acordo com o tipo ósseo de cada paciente.

Os implantes zigomáticos Systhex podem ser utilizados em procedimentos cirúrgicos na reconstrução de maxilas severamente reabsorvidas visando eliminar ou minimizar necessidades de enxertia óssea, onde a altura óssea insuficiente contraindica a inserção do implante convencional, e no edentulismo total. Indicado para recuperar as funções de mastigação.

INSTRUÇÃO DE USO

Preparo do Leito Receptor:

Para evitar trauma cirúrgico, as brocas devem apresentar bom estado de corte e durante a instalação deve-se manter irrigação constante.

Implantes Zigomáticos e Implantes Zigomas:

Avaliação pré-cirúrgica: Três níveis necessitam ser investigados: o nível maxilar, o seio e o zigoma. O exame clínico não é suficiente para esta avaliação e a verificação radiográfica tem que ser considerada. O ortopatograma pode fornecer informação distorcida e assim, o exame de escolha é uma tomografia computadorizada espiral ou helicoidal, o qual possibilita imagens bi e tridimensionais. A tomografia computadorizada (TC) dá a oportunidade de visualizar a saúde da maxila e do seio maxilar. Sinusite, pólipos ou qualquer patologia sinusial podem ser excluídos. A densidade, o comprimento e o volume do zigoma podem ser avaliados e guias especiais para a inserção dos implantes zigomáticos podem ser confeccionados em modelos estereolitográficos para facilitar a orientação dos implantes zigomáticos durante a cirurgia, com erros mínimos na angulação e posição.

Sequência de Brocas:

A sequência de brocas é selecionada de acordo com o planejamento e modelo de cada implante, sendo estes cilíndricos ou cônicos. A profundidade de inserção das brocas durante a perfuração deve ser igual ao comprimento do implante a ser instalado. Para isso as brocas possuem marcações a laser que identificam os comprimentos dos implantes. Para implantes cilíndricos a marcação é 5 mm até 15 mm e para implantes cônicos 8.5 mm até 15 mm. Modelo das Brocas: Helicoidais, Cônicas, Countersinks e Pilotos.

Sequência de Brocas implantes Zigomáticos:

Utilizar primeiramente uma broca esférica para fazer a marcação de entrada no teto posterior-superior do sinus; Continuar a perfuração com a broca esférica até que a mesma penetre na camada cortical exterior do osso zigomático; Usar o instrumental adequado para indicar a profundidade e determinar o comprimento desejado do implante zigomático a ser utilizado; Preparar o alvéolo cirúrgico com a sequência de brocas helicoidais e pilotos mais adequadas ao diâmetro do implante.

Instalação dos Implantes Dentários:

A escolha do comprimento e largura do implante depende da disponibilidade óssea e das cargas oclusais esperadas que incidirão sobre ele.

- 1) Realizar o procedimento de preparação do leito receptor (osteotomia).
- 2) Abrir a embalagem secundária (blister) rompendo o lacre (papel grau cirúrgico).
- 3) Segurar o tubo com a mão não dominante e remover a tampa.
- 4) Com a mão dominante remover a tampa e encaixar a conexão correspondente ao modelo do implante
- 5) Inserir o implante dentro do leito ósseo de acordo com o planejamento cirúrgico para cada modelo de implante.
- 6) Inserir o parafuso de cobertura utilizando a chave 0.9.

**ALERTA! Respeitar o torque máximo de 65 n.cm nos implantes para evitar problemas de adaptação protética (o excesso de torque causa distorção no hexágono do implante) e problemas de osseointegração. Implantes cone fix: utilizar torque máximo de 45Ncm
Implantes 3.5x8.5: utilizar torque máximo de 60Ncm**

A cirurgia deve ser realizada por profissional habilitado e capacitado.

O sucesso de todos os implantes dentários é bastante suscetível à técnica cirúrgica que deve ser realizada corretamente. A escolha de implante único ou múltiplos de tamanho e configuração apropriados para a anatomia existente também é fundamental para o sucesso. Os Implantes Classic TS e Attract TS devem ser utilizados, preferencialmente, em osso do tipo III e IV, podendo ser usado em outros tipos de osso. Implantes curtos deve ser utilizados para substituição de dentes posteriores. Para instalação de implantes curtos não utilizar broca countersink

CONTRAINDICAÇÕES

Avaliar o paciente no pré operatório, de modo a determinar os fatores que possam colocar em risco o paciente, tanto durante o procedimento, quanto no pós cirúrgico. Os implantes dentários Systhex não são indicados para pacientes que apresentem diabetes não controlada, neoplasias malignas, bruxismo, locais onde haja a presença de patologias ósseas ou infecções e outras contraindicações que se encontrem descritas na literatura odontológica. Também não são indicados para indivíduos com qualidade de higiene oral insatisfatória e viciados em tabaco, álcool ou químicos. Os implantes não devem ser inseridos caso a largura e altura óssea alveolares não sejam suficientes para circundar os implantes. Os implantes Cone Fix são indicados para substituição de dentes anteriores mais especificamente incisivos inferiores e laterais superiores. Os implantes Zigomáticos Systhex não são indicados caso haja, presença de processos inflamatórios ou infecciosos dos tecidos intra e extrabucal; · Sintomatologia relacionada aos seios da face (Sinusite Maxilar, pólipos ou qualquer outra patologia dos seios de face); · Casos de relações maxilares desfavoráveis; Casos de hábitos parafuncionais; Casos de reabilitações unitárias e em crianças, antes do término do crescimento e da oclusão epifisária. Os implantes Systhex são vendidos estéreis e de uso único, proibidos de serem reprocessados. Estes implantes não podem ser reesterilizados.

ESTERILIZAÇÃO

Radiação Gama

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Este produto somente pode ser implantado por cirurgiões dentistas habilitados. O uso dos implantes sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá prejudicar o paciente e resultar no fracasso do implante e perda substancial do osso circundante. Deve-se realizar exames radiográficos específicos para a colocação de implantes dentários para avaliação da quantidade, qualidade e altura óssea. Dentre eles, radiografia panorâmica, tomografia computadorizada e radiografia periapical. O cirurgião dentista irá avaliar qual ou quais exames devem ser solicitados ao paciente após sua avaliação clínica. Implantes dentários podem interferir em exames de ressonância magnética (distorções nas imagens). É importante que o cirurgião dentista comunique seu paciente deste risco. Não reesterilize os Implantes Dentários Systhex. Não reutilize os Implantes Dentários Systhex. A reutilização de dispositivos de uso único que tiveram contato com sangue, osso, tecido ou outros fluídos corpóreos podem acarretar em doenças ao paciente ou ao usuário. Possíveis riscos associados com a reutilização de dispositivos de uso único estão associados, mas não limitados, a falhas mecânicas e transmissão de agentes infecciosos. Não utilize os Implantes Dentários Systhex caso a data de validade indicada na embalagem esteja expirada. Utilizar os implantes após a data de validade podem causar perdas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM):

“Condicional para a RM”



Os itens que demonstraram não apresentar riscos conhecidos em um ambiente de ressonância magnética especificado com condições de uso especificadas são rotulados como condicional de RM.

Um paciente com tal dispositivo pode ser examinado com segurança após a colocação nas seguintes condições:

- Campo magnético Estático de somente 1.5 Tesla e 3.0 Tesla.
- Campo magnético de gradiente espacial de no máximo 4000 gauss/cm (40 T/m).
- Taxa máxima de absorção específica (SAR) média de 2 W/kg para corpo inteiro, e de 3,2 W/kg para cabeça, durante 15 minutos de varrimento no Modo de Operação Normal do equipamento. Aumento Máximo da Temperatura 0,5 °C.

ATENÇÃO:

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, a esterilização só é garantida se a embalagem estiver íntegra.
- Deve-se esterilizar corretamente os instrumentais cirúrgicos para evitar infecção.
- Os implantes são de uso único, é proibido reesterilizá-los. A reesterilização pode causar infecções ao paciente.
- O reuso deste produto pode causar efeitos adversos biológicos provenientes de outros produtos, micro-organismos e/ou substâncias resultantes de usos anteriores e/ou reprocessos anteriores; mudanças nas características físicas, mecânicas e químicas, macro e micro estruturais, podendo danificar a funcionalidade do uso desejado.
- Respeitar o torque máximo de 65 N.cm nos implantes para evitar problemas de adaptação protética (o excesso de torque causa distorção no hexágono do implante) e problemas de osseointegração. Implantes cone fix: utilizar torque máximo de 45 Ncm
Implantes 3.5x8.5: utilizar torque máximo de 60Ncm

Pode ocorrer perda óssea excessiva ou quebra de implantes dentários quando um implante é carregado além de sua capacidade funcional. Forçar o implante na osteotomia, além da profundidade estabelecida pelas brocas pode resultar em: alteração na medida do hexágono devido ao excesso de força ocorrendo problemas de adaptação protética; alteração da interface hexagonal da chave dentro do implante; alteração da chave; fusão da interface montador/chave do implante ou alteração das paredes da osteotomia, o que pode impedir a fixação inicial eficaz do implante.

ITENS DE RASTREABILIDADE:

Dentro da embalagem terciária dos implantes (cartucho) são colocadas três etiquetas adesivas contendo as seguintes informações: Nome e tamanho do produto, número de lote e validade do mesmo. Tamanho da etiqueta: 50 mm x 15 mm. O procedimento de rastreabilidade, é de responsabilidade do cirurgião dentista, deve-se colar uma das etiquetas no "Prontuário do Paciente", a outra será colocada na radiografia do paciente e a terceira é entregue ao paciente. Estas medidas têm o objetivo de permitir que as informações completas dos produtos sejam consultadas quando necessárias.

EFEITOS ADVERSOS

O procedimento de instalação de implantes pode provocar leve desconforto e edema localizado. A perda do implante (falha na osseointegração) e perda da prótese podem ocorrer durante o tratamento. Algumas das causas são a falta da quantidade e qualidade óssea remanescente, infecções, higiene oral deficiente e doenças/desordens sistêmicas. A fratura do implante e dos componentes de restauração podem ocorrer com o decorrer do tempo.

CUIDADOS PÓS OPERATÓRIOS E MANUTENÇÃO



INSTRUÇÕES DE USO **Implante Dentário**

Orientar o paciente quanto à necessidade de um acompanhamento profissional pós cirúrgico obedecendo às orientações sobre cuidados, alimentação e prescrição medicamentosa. Nos primeiros 10 dias após a cirurgia, a higienização pode ser complementada com antissépticos bucais. Deve ser dada atenção à higiene oral do paciente e sua adesão ao tratamento.

TEMPO DE PERMANÊNCIA

Os Implantes Dentários Systhex se corretamente instalados e osseointegrados, o tempo de permanência é indeterminado. O sucesso do implante também depende dos cuidados do paciente. Importante orientá-lo sobre os cuidados que devem ser tomados.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em local seco e fresco, longe da ação do sol e umidade.

PRAZO DE VALIDADE

Os implantes dentários Systhex possuem validade de 5 anos a partir da data de esterilização, desde que a embalagem não esteja danificada. Esta informação consta na rotulagem do produto.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia para instalação de implantes dentários deverão ser descartados conforme normas locais.

APRESENTAÇÃO

Os implantes Systhex são vendidos em duas apresentações

- contém 01 implante em titânio e 01 parafuso de cobertura ou
- contém 01 implante em titânio sem parafuso de cobertura.

O modelo, as especificações e as dimensões constam na rotulagem do produto.

FABRICADO POR

SYSTHEX SISTEMAS DE IMPLANTES ÓSSEO INTEGRADO LTDA

Rua Procópio Ferreira Martins, 586 – Cajuru – CEP 82.940-190 – Curitiba – PR

CNPJ 05.644.129/0001-56 Responsável Técnico: Dra. Flavia Nicolau Melhem – CRO/PR 15749. SAC: 0800 600 6905 – www.systhex.com.br – Indústria Brasileira.

Registro ANVISA nº 80290080001

REPRESENTANTE EUROPEU

SBP PORTUGAL LDA

RUA Pinheiro Chagas 68 Cave Esquerda.

1050-180 - Lisboa - Portugal