

Nome Técnico: Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos

Nome Comercial: Curetas

DESCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

As Curetas Systhex são fabricadas em Inox.

As Curetas Systhex são vendidas não estéril e são reutilizáveis.

Tabela 01: Modelos

Descrição
Cureta de levantamento de seio maxilar n 1
Cureta de levantamento de seio maxilar n 2
Cureta de levantamento de seio maxilar n 3
Cureta de levantamento de seio maxilar n 4
Cureta de levantamento de seio maxilar n 5
Cureta de levantamento de seio maxilar n 6
Cureta de levantamento de seio maxilar n 7
Cureta de levantamento de seio maxilar n 8
Cureta de levantamento de seio maxilar n 9
Cureta de levantamento de seio maxilar n 10

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

As Curetas Systhex possuem diversas angulações que são utilizadas para deslocamento da membrana do seio maxilar e colocação de enxerto ósseo.

DESCRIÇÃO DE CADA ITEM

Cureta:

Apresentam forma cilíndrica, mas suas extremidades possuem perfis com diferentes angulações.

INSTRUÇÃO DE USO

Cureta:

As curetas possuem diversas angulações e devem ser utilizadas conforme anatomia do seio maxilar.

CONTRAINDICAÇÕES

As Curetas Ósseas Systhex não apresentam contra-indicações desde que suas finalidades sejam seguidas corretamente e por profissionais devidamente habilitados.

HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

Higienização

As Curetas Ósseas Systhex devem ser higienizados antes e após sua utilização seguindo as etapas abaixo:

1º passo: Submergir a peça em detergente enzimático (solução a 10%).

2º passo: Lavar em ultrassom.

3º passo: Enxaguar com água destilada em abundância até remover completamente os resíduos da solução.

4º passo: Secar com ar comprimido ou com pano seco e limpo.

5º passo: Realizar inspeção visual, observando se há falhas no processo de limpeza.

6º passo: Selecionar a embalagem de acordo com o processo de esterilização.

Importante:

Nunca armazenar o material sem completa secagem.

Atenção:

Não utilizar produtos desincrustantes, pois tendem a escurecer as peças e provocar oxidação. O líquido enzimático numa concentração superior a 10% favorece a oxidação, assim como a secagem de peças contendo resíduos da solução de limpeza. **A secagem das peças é de extrema importância antes do armazenamento e esterilização, pois o acúmulo de umidade nos produtos é prejudicial e pode ocasionar pontos de oxidação.**

Esterilização

As Curetas Systhex são reutilizáveis e fornecidos não estéreis e devem ser esterilizado antes do uso.

Esterilizar na véspera ou no dia do procedimento.

A esterilização não substitui a limpeza.

Recomenda-se, preferencialmente, seguir o método de esterilização por autoclavagem a vapor, selecionando um ciclo de esterilização seguido de um ciclo de secagem:

Temperatura esterilização:

132°C, Ciclo de esterilização: 20 minutos, Ciclo de secagem: 20 – 60 minutos.

Recomenda-se consultar os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ISO 17665-1:2006 - *Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

As Curetas Systhex somente deverão ser utilizados por cirurgião dentista devidamente habilitado. O uso do instrumento cirúrgico sem conhecimento das técnicas adequadas e /ou procedimentos e condições inadequadas, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.

O produto não deve ser usado se a embalagem estiver danificada

As Curetas Systhex são reutilizáveis e fornecidos não estéreis e devem ser esterilizado antes do uso.

Esterilizar em autoclave.

EFEITOS ADVERSOS

Apenas ocorrerão se a escolha pelo instrumental for indevida ou se usado por profissional não habilitado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As Curetas Systhex deverão ser armazenados em local limpo e seco, longe da ação do sol e umidade.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia para instalação de implantes odontológicos e seus componentes deverão ser descartados conforme normas locais.

PRAZO DE VALIDADE

As Curetas Systhex possuem prazo de validade indeterminado, contudo desgastes após o uso frequente poderão influenciar na funcionalidade dos instrumentos.

FABRICADO POR

SYSTHEX SISTEMAS DE IMPLANTES ÓSSEO INTEGRADO LTDA

Rua Procópio Ferreira Martins, 586 – Cajuru – CEP 82.940-190 – Curitiba – PR

CNPJ 05.644.129/0001-56 Responsável Técnico: Dra. Flavia Nicolau Melhem – CRO/PR 15749. SAC: 0800 600 6905 – www.systhex.com.br – Indústria Brasileira.

Registro ANVISA nº 80290080021



INSTRUÇÕES DE USO
Curetas

REPRESENTANTE EUROPEU

SBP PORTUGAL LDA

RUA Pinheiro Chagas 68 Cave Esquerda.

1050-180 - Lisboa - Portugal